

Plum Wund- und Augensprühspray 45530 mit 50 ml Inhalt



Plum Wund- und Augenspray 50 ml mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung. Der gleichmäßige Sprühstrahl sorgt für schnelle und wirksame Hilfe bei der Versorgung kleinerer Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge. Das Spray kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril. Die Schutzkappe schützt den Sprühkopf vor äußeren Verschmutzungen. Hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe. Gesamtsprühzeit bei vollständig gefüllter Dose: ca. 5 Minuten. Haltbarkeit: 3 Jahre.

ANWENDUNG:

- Vor der Anwendung den Sprühkopf durch kurzes Sprühen in die Luft reinigen. Nicht verwenden, wenn der Sprühkopf verstopft ist.
- Halten Sie den Sprühkopf mit ca. 10 cm Abstand vor die Wunde oder das Auge
- Drücken Sie den Sprühkopf und sprühen Sie auf die Wunde oder ins Auge
- Berühren Sie nicht die Wunde oder das Auge mit dem Sprühkopf

IHRE VORTEILE BEIM EINSATZ:

- Schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand
- Ermöglicht sicheres, wirksames und präzises Sprühen
- Kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril
- Die Schutzkappe schützt den Sprühkopf vor äußeren Verschmutzungen
- Hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe
- Umweltfreundlich und voll recyclebar - eingestuft als nicht brennbares Aerosol
- Haltbarkeit: 3 Jahre - das Ablaufdatum befindet sich auf der Unterseite der Dose
- Gesamtsprühzeit bei vollständig gefüllter Dose ca. 5 Minuten

Artikel-Nr.: **45530**